

GEL HYDROALCOOLIQUE

**Action désinfectante des
mains**



**Usage BIOCIDÉ (TP1)
Ethanol 680 g/L**

USAGE PROFESSIONNEL

Non moussant, ne tâche pas, garanti sans colorant. Permet un usage fréquent

Prêt à l'emploi, ne nécessite pas d'eau, pas d'essuyage, sèche rapidement, sans déshydrater ou desquamer l'épiderme. **Ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes.**

Rafrâichissant, réduit les désagréments consécutifs à la sudation des mains.

Désinfectant rapide : BACTERICIDE – FONGICIDE-VIRUCIDE pour la réduction de la contamination microbienne manu-portée, l'hygiène des mains, des gants de manipulation.

Appliquer sur mains propres et sèches par friction, le gel apporte une action :

➤ **BACTERICIDE** efficace suivant normes suivantes :

- NFT 72.151 (p.v. efficacité NL/95335/1) Pseudomonas aeruginosa CIP A 22, Escherichia coli CIP 54 127, Staphylococcus aureus CIP 53.154, Enterococcus hirae CIP 5855, mycobacterium smegmatis CIP 73.26
- NF EN 1040 (p.v. efficacité 05140/6) sur Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Staphylococcus aureus CIP 4.83
- NF EN 1276 (pv. efficacité 05140/7) sur Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Escherichia coli CIP 54 127, Staphylococcus aureus CIP 4.83, Enterococcus hirae CIP 5855.
- NFT 72.301 (p.v. efficacité 01176/1) sur listeria monocytogenes CIP 54.149.
- NFT 72.301 (p.v. efficacité 01208 /8) sur salmonella typhimurium CIP 5858.

➤ **FONGICIDE ET VIRUCIDE :**

- EN 1275 (p.v. efficacité 03265 /1) sur Candida albicans (5 minutes)
- . Appliqué sur les mains propres et sèches, ce gel par sa haute teneur en alcool, supérieure à 20 %, exerce une action virucide contre le virus HIV(SIDA)
- . Participe à l'hygiène des mains en conformité avec la Norme Européenne EN 1500 (traitement hygiénique des mains par friction).

Participe à l'hygiène des mains en conformité avec la Norme Européenne EN 1500 (traitement hygiénique des mains par friction).

EDIALUX France

ZA MACON EST, 01750 REPLONGES

Téléphone : (33) 03 85 31 89 10

Télécopie : (33) 03 85 31 89 11

E-mail : info@edialux.com

MAJ 09/09

APPLICATION

S'utilise dans les services médicaux et professions de santé, crèches, maisons de retraite, médecins, infirmiers, infirmiers à domicile, laboratoires d'analyses, dentistes, centres de soins ou de consultations, ambulanciers, pompiers et services de secours ou d'urgence, secouristes, kinésithérapie, thalassothérapie, vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les élevages,...

Agroalimentaire : ateliers de fabrication, de conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuteries, magasins de ventes, hypermarchés, etc...

Pour la désinfection des mains avant intervention ou avant d'enfiler les gants, de la surface externe des gants des personnels avant ou après interventions ou lors des manipulations exigeant des précautions d'hygiène ou pour les petites surfaces ou objets (préalablement nettoyés) utilisés en commun.

MODE D'EMPLOI

En application **PREVENTIVE** avant de manipuler les objets, les matériels, surfaces, denrées alimentaires.






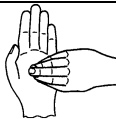
En application **CURATIVE** après chaque passages aux sanitaires ou après avoir touché des supports, objets contaminés ou présentant des risques de transferts manu-portés de micro-organismes.

S'utilise sur des mains, surfaces préalablement propres et sèches.

Appliquer le gel à l'aide d'un distributeur ou d'un flacon portatif approprié (dans le cas d'utilisation de flacon, il est recommandé de presser le corps du flacon à l'aide d'une lingette sèche à usage unique afin de diminuer les risques de contamination par la manipulation commune d'un seul flacon).

Prélever le volume d'une noix (soit 3 ml) dans le creux d'une main. Bien étaler sur les mains en insistant par friction, entre les doigts, autour des ongles, au niveau des poignets pendant 60 secondes.

Ne pas rincer ni essuyer après l'application

 Paume contre paume	 Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le dos de la main droite.	 Paume contre paume avec les doigts entrelacés	 Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés.	 Friction circulaire du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice versa	 Friction en rotation en mouvement de va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice versa.
--	---	---	--	--	--

EDIALUX France

ZA MACON EST, 01750 REPLONGES

Téléphone : (33) 03 85 31 89 10

Télécopie : (33) 03 85 31 89 11

E-mail : info@edialux.com

MAJ 09/09

AVERTISSEMENTS – PRECAUTIONS SPECIFIQUES

□ R 10 inflammable

- . Conserver hors de la portée des enfants dans son emballage d'origine.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . Protéger du gel au stockage.
- . En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes à l'eau claire.
- . Ne pas mélanger car non compatible avec des savons, détergents.

PRESENTATION

Flacon de 200 ml – carton de 12 unités

Flacon de 500 ml avec pompe – carton de 6 unités

DUREE DE CONSERVATION

Minimum 2 ans dans emballage d'origine fermé.

Les renseignements fournis sur la présente fiche le sont à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité d'EDIALUX FRANCE.

EDIALUX France

ZA MACON EST, 01750 REPLONGES

Téléphone : (33) 03 85 31 89 10

Télécopie : (33) 03 85 31 89 11

E-mail : info@edialux.com

MAJ 09/09